

Hurtigveiledning: Bruke Cyclo G6®-laser med Sweep Management-programvare og MicroPulse P3®-leveringsenheten*




1 Vri nøkkelen til "ON" (PÅ). Vent til initialiseringen er fullført. Koble til MicroPulse P3-proben.


4 Angi behandlingsparametere
Angi parametere ved hjelp av menyen Preset (Forhåndsinnstilling) eller ved å legge dem inn manuelt.

Alternativet Forhåndsinnstilling

Alternativet Manuell

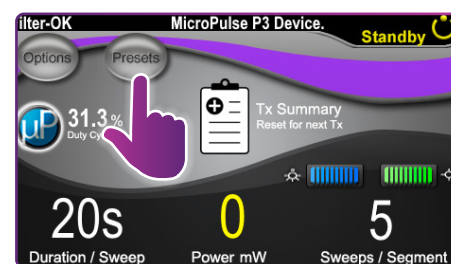


SE FLERE TRINN PÅ BAKSIDEN

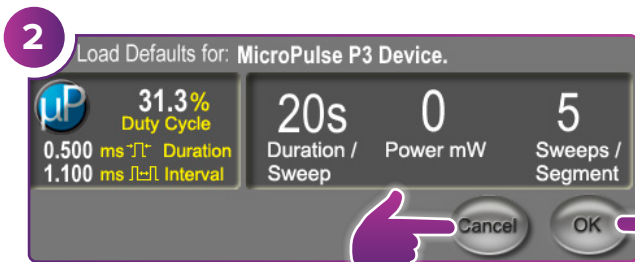

2 Velg "OK" for å angi nye parametere. Et popup-skjerm bilde vises (trinn 3).


Velg "CANCEL" (AVBRYT) for å beholder parametere som ble brukt i den forrige behandlingen. Et popup-skjerm bilde vises (trinn 3).

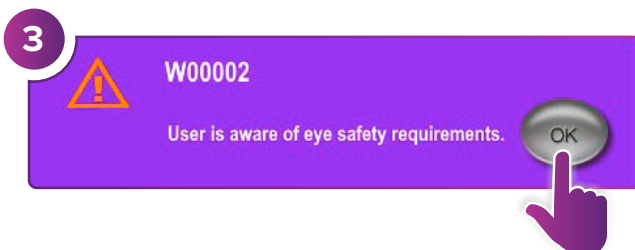


3 Trykk på "OK". Gå til trinn 4 for å angi nye parametere. Gå til trinn 5 for å beholde parametere.




* Før levering av behandling, se "brukerveiledningen for Cyclo G6-programvareoppgradering for MicroPulse TLT", "brukerhåndboken for Cyclo G6-lasersystemet" og "bruksanvisningen for MicroPulse P3-leveringsenheten" for leveringsinstruksjoner, inkludert sikkerhet, advarsler og forholdsregler.

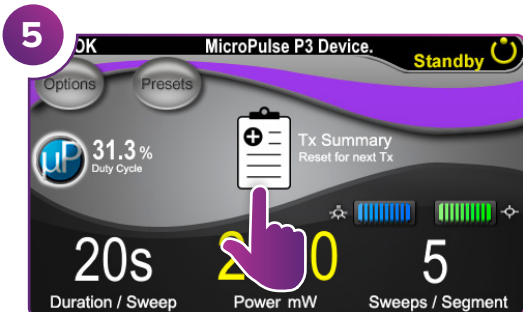


Velg "Tx Summary" (Tx-sammendrag).

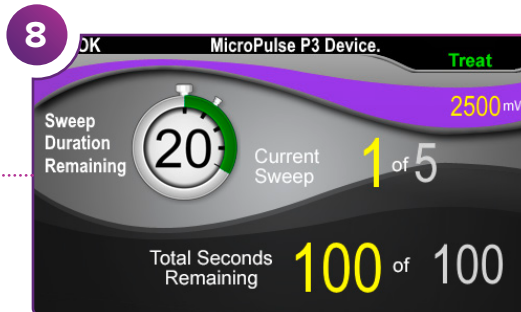


Lever behandling til ønsket segment.

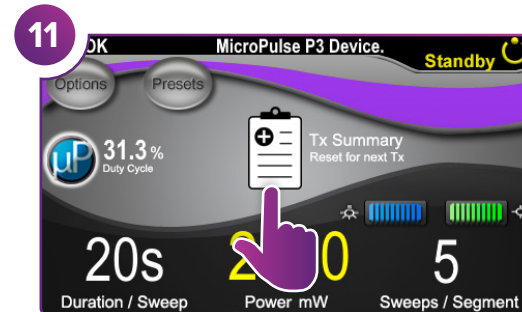


Trykk for å vise behandlingssammendrag.

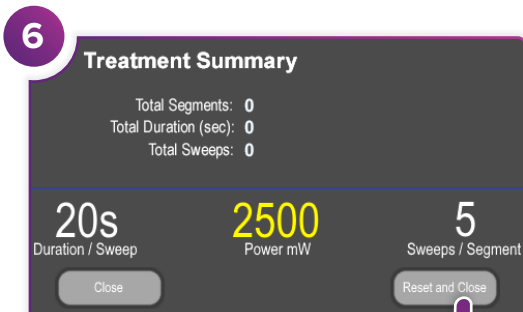

Bekreft at verdiene for "Total Segments" (Segmenter totalt), "Total Duration" (Total varighet) og "Total Sweeps" (Totalt antall sveip) tilbakestilles til null.

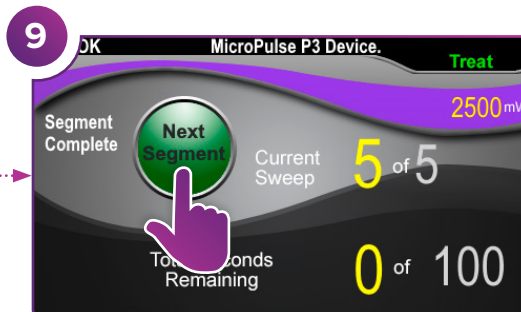

Trykk for å tilbakestille verdiene. Gjenta trinn 8 for å behandle neste segment. Når behandlingen er ferdig, fortsetter du til trinn 10.

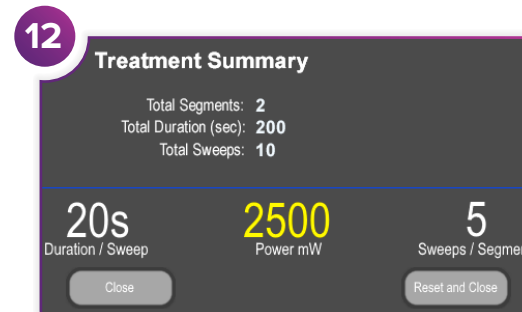


Gjennomgå behandlingssammendraget.




Trykk på denne knappen for å gå inn i Treat (Behandlingsmodus) (aktivere laser).



Når behandlingen er fullført, trykker du på denne knappen for å gå inn i Standby (Ventemodus) (deaktivere laser).

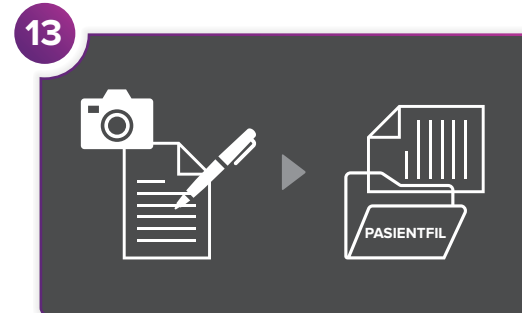

Logg behandlingssammendraget.

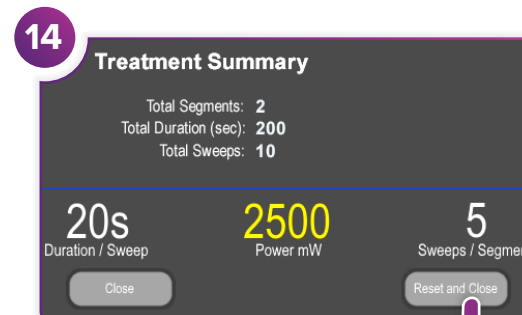

Tilbakestill for neste behandling.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com
 © 2022 Iridex. Med enerett. Iridex, Iridex-logoen, MicroPulse, MicroPulse P3 og Cyclo G6 er registrerte varemerker som tilhører Iridex. 88305-NB.A 02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 Nederland

