

# クイックガイド：スイープ管理ソフトウェア搭載Cyclo G6<sup>®</sup>レーザーとMicroPulse P3<sup>®</sup>デリバリーデバイス\*の使用方法





キーを[ON (オッケー)]まで回します。初期化が完了するまで待ちます。MicroPulse P3プロローブを接続します。

4 治療パラメーターの設定  
[Preset (プリセット)]メニューを使用するか、手動入力でパラメーターを設定します。

プリセットオプション

手動オプション

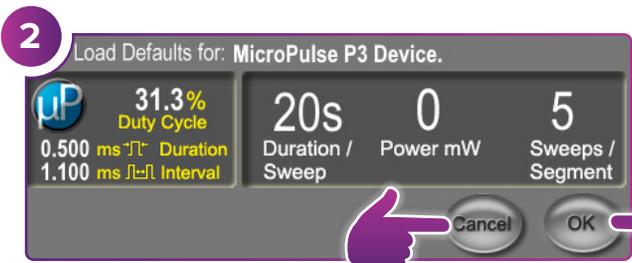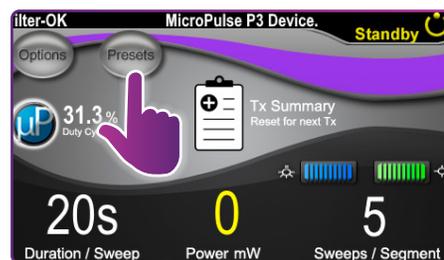

[OK (オッケー)]を選択し、新しいパラメーターを設定します。ポップアップ画面が表示されます(手順3)。

CANCEL (キャンセル) を選択し、前の治療で使用したパラメーターを保持します。ポップアップ画面が表示されます(手順3)。




裏面に続く ▶




[OK (オッケー)]を押します。新しいパラメーターを設定する場合は、手順4に進んでください。パラメーターを保持する場合は、手順5に進んでください。




\* 治療を実施する前に、『ユーザーガイド：MicroPulse TLT向けのCyclo G6ソフトウェアアップグレード』、『Cyclo G6レーザーシステムオペレーターマニュアル』、および『MicroPulse P3デリバリーデバイス使用説明書(IFU)』を参照し、安全性、警告、および注意を含む実施手順を確認してください。

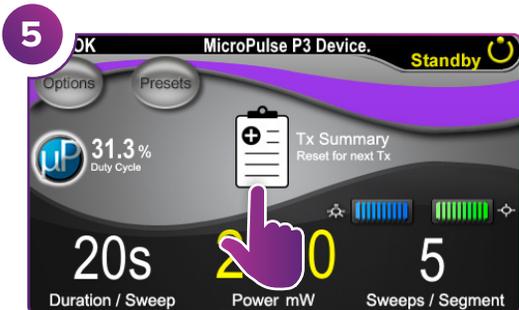


5 **[Tx Summary (Txサマリー)]**を選択します。

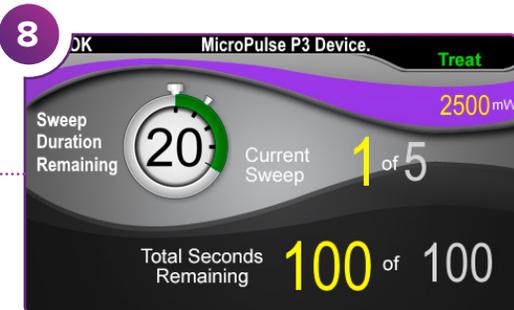

8 所要のセグメントを治療します。

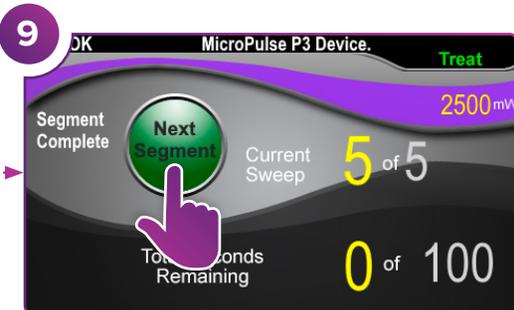

9 このボタンを押して、値をリセットします。次のセグメントを治療するには、手順8を繰り返します。治療が完了したら、手順10に進んでください。

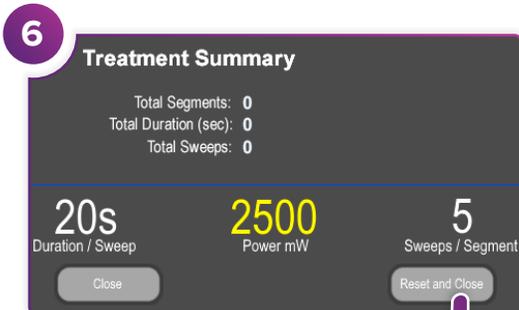


6 **[Total Segments (合計セグメント)]**、**[Total Duration (合計時間)]**、および**[Total Sweeps (合計スイープ)]**の値が0にリセットされていることを確認します。




7 このボタンを押して**[Treat (治療)]**モードにします(レーザーを有効にします)。




10 治療が完了したら、このボタンを押して**[Standby (スタンバイ)]**モードにします(レーザーを無効にします)。

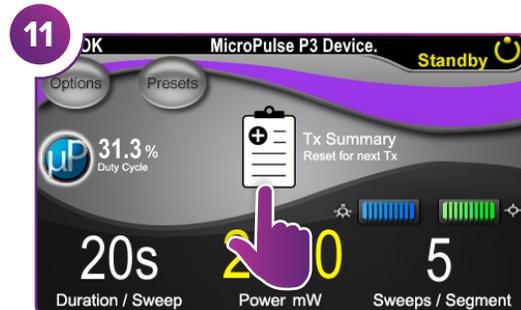


11 このボタンを押して治療サマリーを表示します。

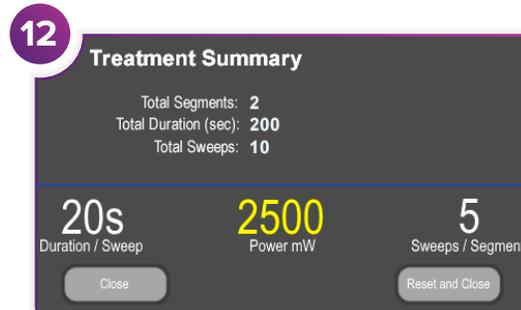

12 治療サマリーを確認します。

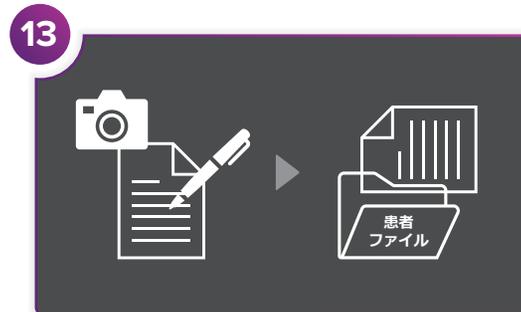

13 治療情報を記録します。

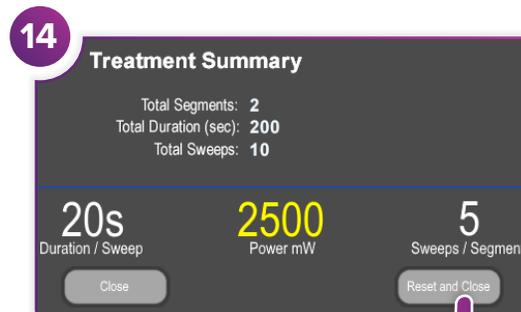

14 次の治療に備えてリセットします。



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com  
© 2022 Iridex. 無断複写・転載を禁じます。Iridex、Iridexのロゴ、MicroPulse、MicroPulse P3、およびCyclo G6は、Iridexの登録商標です。88305-JA.A 2022/02



CE 2797

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
オランダ

